


機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN70682000

DHミキシングチップ

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

形状：全長 67.6 mm
ミキサーハウジング（練和部分） 内径φ6.5 mm

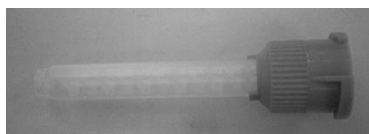


原理：歯科材料が充填されたカートリッジの先端に本品を取り付け、押し出すときに本品内で練和される。

【使用目的又は効果】

歯科材料の練和に使用する。

【使用方法等】

- ①DHディスペンサーⅡ（別売り）に、歯科材料を充填したカートリッジを装着する。
- ②カートリッジのキャップを取り外し、先端に本品を装着する。
（カートリッジの切り込み部分と、本品の出っ張り部分を合わせるように奥まで差込み、右に90°回転させ、しっかりと固定する。）

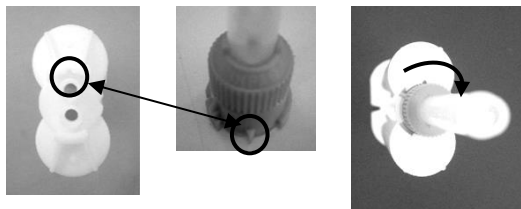

- ③DHディスペンサーⅡ（別売り）のハンドルを握って、必要分を少しずつ押し出します。
- ④使用后、本品をカートリッジから取り外す場合は、左に90°回転させ、本品の突起部分とカートリッジの切り込み部分を合わせ引き抜きます。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・使用前に、カートリッジがDHディスペンサーⅡに、又本品がカートリッジに確実に装着されていることを確認すること。
- ・ペーストを急激に押し出すと、ペーストの漏れ、カートリッジ及び本品の破損を引き起こす恐れがあります。
押し出しは静かにすること。
- ・本品を使用する際は、使用する製品（カートリッジ）及びDHディスペンサーⅡの添付文書の指示に従うこと。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品が破損している場合は使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

- *住 所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
- *電話 番号：075-672-2118

製 造 元：Sulzer Mixpac AG（ズルツァー ミックスパック社）
国 名：スイス