



DENKEN-HIGHDENTAL

# 描くように、 硬質リライナーを盛る。

硬質リライニング材では業界初\*のペーストタイプ。

粉と液の計量・混和がいらないため、チェア時間を大幅に短縮できます。



保険適用

# DH Fit Reliner

DH フィットリライナー



軟質 → 硬質  
硬質リライニング材では業界初!  
ペーストタイプ

## DHフィットリライナー基本セット 標準価格 ¥6,000

- DHフィットリライナー本材……………55g/1本
- DHフィットリライナー専用プライマー……………7mL/1本
- DHミキシングチップ……………2本

- DHフィットリライナー 本材単品  
55g/2本(DHミキシングチップ2本付)  
…………標準価格¥7,000
- DHフィットリライナー専用プライマー  
単品 30mL/1本…………標準価格¥2,500

- DHミキシングチップ  
32本入り…………標準価格 ¥2,300
- DHディスペンサーII  
1台…………標準価格¥4,800

\*2022年5月時点、国内で販売されている義歯床用硬質裏装材を対象とした自社調査で、業界初のペーストタイプ。

業界初 ペーストタイプ  
硬質ライニング材

# DHフィットリライナー

## 1 時間の短縮

計量・混和の手間がいないペーストタイプです。

当社、粉・液レジンの場合

粉・液の計量 30秒 混和 10秒 盛り上げ 20秒 60秒

盛り上げ 20秒 **20秒!** 大幅に短縮!

DHフィットリライナー

## 2 良好な操作性

筋圧形成が容易な粘度が持続し、  
硬化後の研磨も容易です。  
(盛り上げから最終硬化まで5分間)



◀操作性を動画で  
ご覧いただけます。



## 3 低臭性

液体のようにモノマーが揮発しないため、  
ほとんど臭いがありません。

## 4 携帯性

ペーストカートリッジ式なので持ち運びもラクラク。  
訪問診療にも適しています。



## 5 無駄が少なく 経済的

必要な量を直接盛り上げるため、  
廃棄ロスが減少します。

### 使用方法



カーバイトバーにて新鮮面を出します。



専用プライマーを薄く均一に塗布し、乾燥させます。



ペーストを盛り上げます。



7 洗浄

6 通法に従い研磨します。



5 トリミング、形態修正を行います。



4 筋圧形成後、口腔内で硬化させます。

### 色調



母材の色と調和するクリアピンク

### 接着可能な材料

- ・アクリルレジン床
- ・アクリジェット
- ・アクリショット
- ・ポリカーボネイト床

使用量の目安は、本材1本で…

下顎総義歯 **7~8床分**です。

販売名：DHフィットリライナー 一般的名称：義歯床用硬質裏装材 管理医療機器 認証番号：229AHBZX00004000  
販売名：DHミキシングチップ 一般的名称：歯科用練成器具 一般医療機器 届出番号：26B2X10018M00102  
販売名：DHディスペンサーⅡ 一般的名称：歯科用練成器具 一般医療機器 届出番号：26B2X10018M00101

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018

代理店



エア・ウォーターグループ  
**デンケン・ハイデンタル 株式会社**

本社：京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店 東日本営業所 九州営業所

☎075-672-2118 ☎03-3969-8000 ☎092-710-5360