

器 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 JMDN 70754000

セラミックルツボ

【形状・構造及び原理等】

寸法

名称	最大 外径 (mm)	最大 内径 (mm)	高さ (mm)
セラミックルツボ	37.5	32.5	61
セラミックルツボ CAS	20	17.6	65
セラミックルツボ N.S.C	24	18	98.5
セラミックルツボ Robo	30	18	96.5
セラミックルツボ S.C	24	20	98.5
**セラミックルツボ S.C.C	24	18	98.5

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用フラスコ、
鑄造リング等をいう。

【使用方法等】

操作方法または、使用方法

使用する鑄造器本体の取扱説明書に従って使用するこ
と。

【使用上の注意】

詳細については使用する鑄造器の取扱説明書を使用前
に必ずお読みください。

- 1) 鑄造の終わったルツボは高温になっています。必ず
鑄造器に付属している専用のピンセットを使用して
取り出すか、ルツボの温度が下がってから取り出して
ください。
- 2) 周囲に燃えやすい物が無いこと。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前には必ず消耗していないか、割れはないかを
確認してください。異常があれば新しいものと交換
してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

*

TEL 075-672-2118

- 2) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社