

## スキャンングスプレー

### 【警告】

高圧ガスを使用した可燃性の製品のため下記の注意を守ること。

1. 炎や火気の近くで使用しないこと。
2. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと
3. 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところや火気等の近くなど温度が40℃以上となるところに置かないこと。
4. 火の中に入れてはいけないこと

### 【禁忌・禁止】

- ・本品を口腔内に噴射しないこと。
- ・人体に向けて噴射しないこと。噴射物を直接吸入しないこと。
- ・使い切って捨てること。捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてから地域の指示に従って廃棄してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光の当たるところや火気等の近くなど、40℃以上となる環境に保管しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

\*住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

\*電話番号: 075-672-2118

製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社

### 【形状・構造及び原理】

本材は噴射剤であるガスと白色結晶を含む原液で構成されるエアゾール製品で、スプレー缶に充填されている。標準の内容量は250 mLである。

成分: LPガス、イソプロパノール、イソヘキサン、その他

原理: 本材を作業模型の光学印象採得対象に塗布することで、微細な層を形成し、光学印象採得時の光の乱反射を遮蔽する。

### 【使用目的又は効果】

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットの光学印象採得時に、乱反射等を防止するために用いる材料で、模型から印象採得するものである。

### 【使用方法等】

1. 使用前はよく缶を振ってください。
2. スキャンする対象物に対して一定の距離を保ち、噴射口を動かしながら均一にスプレーしてください。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・対象物にノズルを近づけすぎると、均一にスプレーできず、正確なスキャンができなくなります。
- ・ご使用の際は、缶をよく振って立てたままお使いください。

### 【使用上の注意】

- ・適切な換気を行い、適切な保護具(保護メガネ、保護グローブ等)を着用すること。
- ・気分が悪くなった際は、医師に連絡すること。
- ・本製品の取り扱い時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。