

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN 70901000

## ハイバレル研磨材(ブルー)

### 【形状・構造及び原理】

本材は灰青色・四角錐状のバレル用研削材と白色・円柱状のバレル用研削材の混合品である。

成分: 酸化アルミニウム、その他

原理: 本材と対象となる補綴物がバレル槽の運動によって擦れ合うことで、補綴物を研削・研磨する。

### 【使用目的又は効果】

酸化アルミニウム(アルミナ)が主成分の技工用研削材。

対象となる補綴物とともにバレルに投入して使用する。

### 【使用方法等】

使用する研磨機器の取扱説明書に従って、補綴物とともに本材、水、コンパウンドをバレル槽に入れ、研削・研磨を行う。

### \*【使用上の注意】

- ・本製品は使用目的の用途以外には使用しないで下さい。
- ・粉塵による眼や呼吸器への刺激の恐れがあるため、適切な保護具(保護マスク・保護手袋・保護眼鏡)を着用し、換気の良い場所で取り扱うこと。
- ・粉塵や欠片が目に入った場合は、目を擦らずに直ちに多量の清潔な水で洗い流す。コンタクトレンズが容易に外せる場合は外して洗浄を続ける。必要に応じて、医師の診察を受けること。
- ・内容物や容器を廃棄する場合は、国又は都道府県の規則に従い、産業廃棄物処理業者に委託すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・容器を密閉して、涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。
- ・水漏れ厳禁。積み置きによる荷崩れに注意して保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\*住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

\*\*電話番号: 075-672-2118

製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社