


取付け方


■取付ける前に

●ファーンレスの炉体上部の穴に、ガス抜きスリーブ（煙突）が取り付けられていることを確認しておく

1 付属のネジでファーンレス本体と固定する

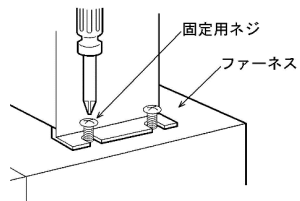

2 排煙ダクトと本器を排煙ダクト固定金具で固定する

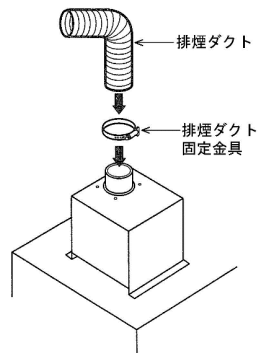

3 本器の電源コードをファーンレス後部のクリーナコンセントに接続する

- 本器の電源はファーンレス本体から自動で供給する。
- 3000Plus、5000Plus に取付けの際は、ファーンレスに付属の延長ケーブルを使用して接続してください

効果低下の原因と対処法

原因	対処法
ファーンレス後部のクリーナヒューズが断線している	テスタ等で導通テストを行ない、断線している場合は同じ定格のガラス管ヒューズと交換する
排煙装置本体のファンが故障している	修理が必要ですので販売店にご相談ください

仕様

	KDF-VF71	KDF-VF72
寸法	246(W)×267(H)×224(D) mm	
質量	5.2kg	6.0kg
電源・電力	AC100V±10% 50/60Hz 40VA	AC200V±10% 50/60Hz 50VA
風量	2.4 / 2.7m ³ / min (50/60Hz)	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・排煙ダクト2.5m（伸張時） 1本 ・固定用ネジ 4本 	<ul style="list-style-type: none"> ・排煙ダクト固定具 1個 ・取扱説明書（本書） 1冊

デンケン・ハイデンタル 株式会社


〒601-8356 京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店：TEL. 075-672-2118 故障／修理：TEL. 075-672-2145

VENTILATOR

排煙装置 KDF-VF71 / KDF-VF72

取扱説明書

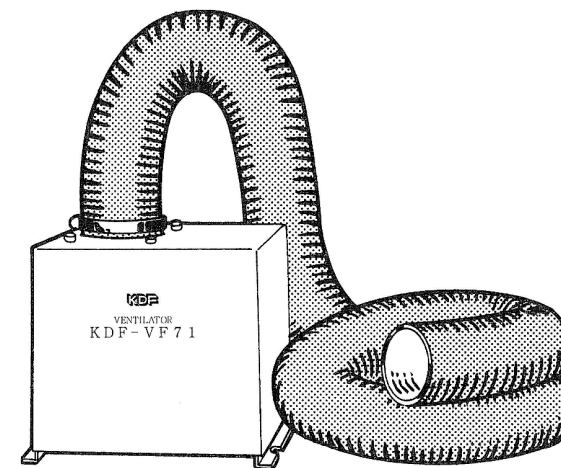

正しくお使いいただくために、取扱説明書は必ず最後までお読みください。

デンケン・ハイデンタル 株式会社

安全にご使用いただくために

本器の設置、運転、操作、保守点検の前に、必ずこの取扱説明書の内容を熟読し、正しくお使いください。
取り扱いを誤った場合、死亡、傷害、火災、物的損害を起こす可能性があります。



お読みになった後は、いつでも見られる所に保管してください。
また、紛失した場合は速やかに販売店より購入してください。

本器の取扱説明書をお読みいただく際は、取扱説明書に出てくるシンボルマークに注意してお読みください。
シンボルマークは下記に示すようにそれぞれ”注意事項”を表します。
また、これらのシンボルマークの付いている箇所の注意事項を無視して誤った取り扱いをすると、下記の不具合が起きる可能性があります。

警告

死亡、重傷および物的損害を負う可能性があります。


注意

軽傷、および物的損害を負う可能性があります。


使用上の注意事項

警告 死亡、重傷および物的損害を負う可能性があります。

指示された箇所以外の分解は絶対にしない

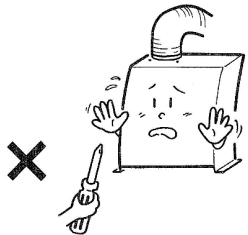


水をかけたり、湿気やほこりの多い所、蒸気の当たる所に設置しない

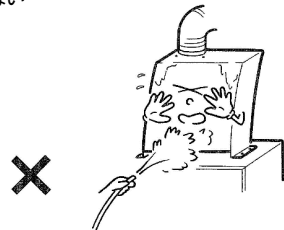


注意 軽傷、および物的損害を負う可能性があります。

使用前に点検、確認する

●もし異常があったときは使用を中止し、販売店に修理をお申し付けください。

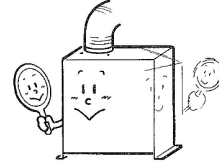


本来の目的以外に使用しない

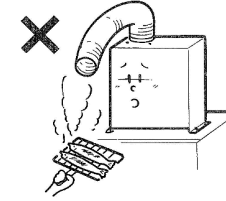


コードに負担をかけない

●挟み込んだり、上に重いものを乗せるなど。

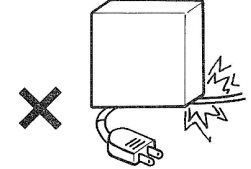

異物を入れない

●ダクトホース取付口、及びガス導入口等

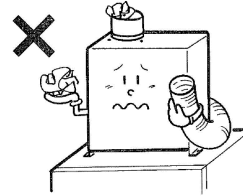

本器の近くで可燃物を使用しない



他の機種へ取付けない（危険！）

●専用機種は右記の通りです。
他の機種へ取付ける場合は販売店にご相談ください。

KDF-VF71	007Plus(100V)、300Plus、007EX(100V)
KDF-VF72	007Plus(200V)、008Plus、009Plus、500Plus、1500Plus、3000Plus、5000Plus、007EX(200V)、008EX

開梱後、付属品の確認をする

●不足している場合はすぐに販売店にお申し付けください。


固定用ネジ

4本




取扱説明書（本書）

1冊

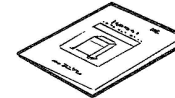

排煙ダクト2.5m（伸張時）

1本

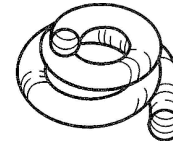

排煙ダクト固定具

1個



特徴

1. リン酸塩系埋没材、石膏系埋没材から焼却時に発生するアンモニア、一酸化炭素、塩化水素、ワックス等の有臭、有害ガスを屋外やドラフト等に排出します。